



BANDE de KINESIOLOGIE KINTEX „CLASSIC“

CARACTERIQUES principales

- ✓ Bande de kinésiologie compacte
- ✓ Adhésive acrylique ondulée
- ✓ Port confortable pendant 5-7 jours
- ✓ Inclus mini guide dans chaque boîte
- ✓ 6 boîtes distributrices (sur demande, voir photo)
- ✓ Couleurs: beige, bleue, rose, verte (autres couleurs sur demande)



DETAILS techniques

- ✓ Dimensions: 5cm x 5m
- ✓ Matériel: 100% cotton
- ✓ Adhésif: adhésif acrylique
- ✓ Pré-étiré 10% pré-étirés sur le matériau de base
- ✓ Extensible: 50 - 60 % dans le sens longitudinal

INFORMATION complémentaire



- ✓ ISO 13485 Certificat
- ✓ Durabilité: 2 ans

ART.NO.	EAN	COULEUR	EFFET*
55KBG	0609613625756	BEIGE	NEUTRE
55KBL	0609613625718	BLEUE	FRAIS
55KRS	0609613625732	ROSE	STIMULANT
55KVR	0609613625725	VERTE	CALMANT

* The effect of color is secondary and can be concomitantly used for therapy

distribué par :

LABORATOIRES PHYTOMEDICA

Service commande - BP80005

TEL: +33(0) 4 42 24 56 24

commercial@phytomedica.eu

F-13791 Aix-en-Provence cx 3

FAX: +33(0) 4 42 24 56 28


web: www.phytomedica.fr



I-CUT




Y-CUT

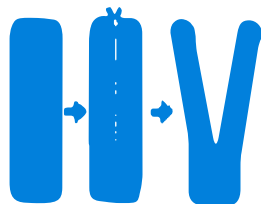

X-CUT



W-CUT

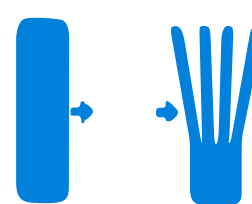

Kintex Kinesiology Tape

Grâce à la structure ondulée de l'adhésif acrylique hypoallergénique, le Kintex Tape est bien toléré par la peau, est extensible de 40 à 60% et assure une adaptation parfaite aux structures du corps humain, qu'il s'agisse par exemple de la peau, des fascias, muscles, méridiens, etc. Il est en outre extrêmement robuste, hydrophobe et résistant à la déchirure.

EXPLICATION DES SYMBOLES



Conserver dans un endroit sec.



Ne pas utiliser 2 fois.



Lire et respecter le mode d'emploi.



Mettre à l'abri du soleil.



Exempt de latex.

APPLICATION

- Mesurer la longueur voulue et couper le Tape avec des ciseaux, en veillant à arrondir les coins !
- Retirer le papier protégeant le Tape, sans mettre les doigts sur la partie collante, en commençant par la base (5 cm environ) et en poursuivant avec le reste du Tape.
- Avant d'appliquer le Tape, pré-étirer les muscles, ceci variant suivant la cible et le type d'application.
- Vous pouvez utiliser le Kintex Tape pour les traumatismes sportifs, douleurs articulaires, maux de dos, œdèmes, raideurs musculaires et autres indications et contre-indications.
- Sur Internet, nous proposons plus de 40 vidéos relatives aux techniques d'application.

MISE EN GARDE

Ne jamais utiliser les Tapes sur des blessures, sur des plaies ouvertes ou en tant que bandages.

Retirer le Tape si vous ressentez des irritations ou une réaction allergique.

Avant tout taping, un diagnostic détaillé constitue la base thérapie ciblée.

Nous recommandons de ne confier l'application de notre Tape qu'à des thérapeutes ou médecins formés en conséquence.

L'efficacité des tapes kinésiologiques n'est pas scientifiquement prouvée. Nos déclarations se basent sur notre expérience de longue date.

MATIERE

97% coton · 3% spandex

www.kintex.de/Anleitungen

